

S.S. White

Fluorniz

Verniz com Flúor

Descrição

Fluorniz é um verniz com flúor contendo 5% de fluoreto de sódio (equivalente a 2,26% de flúor) em uma base adesiva de resinas naturais.

A aplicação tópica de Fluorniz é fácil e eficiente, permitindo um contato prolongado do flúor com o esmalte, permanecendo nas regiões dentárias onde é necessário o efeito preventivo.

Composição

Fluorniz

Fluoreto de Sódio 5,00g%

Excipientes: colofônia, etilcelulose, bálsamo de tolú, cera de abelha, toluenosulfonamida, vanilina, sacarina, álcool absoluto.

Solvente

Álcool Etílico

Indicações

Fluoretação do esmalte dentário e profilaxia da cárie dental.

Tratamento dessensibilizante de colos dentinários

Na prevenção da reincidência de cárie nas margens das cavidades após restauração, principalmente nos casos em que foi empregada a técnica do ataque ácido

Como profilaxia a situações suscetíveis a cárie, tais como dentes com brackets, superfícies dentárias descalcificadas e fissuras descoloradas.

Contra-Indicações

Fluorniz é contra-indicado nos casos de pacientes com gengivites ulcerativas e estomatite.

Efeitos Colaterais

Quando utilizado com a técnica correta, não apresenta efeitos colaterais dignos de nota.

Interações

Não há.

Modo de usar

Com o auxílio de uma taça de borracha, faça a profilaxia dos dentes com pedra-pomes.

Lave-os abundantemente e seque-os.

Agite bem o Fluorniz antes da aplicação.

Inicie a aplicação pelas faces proximais, pincelando-as com uma fina camada de verniz. Para os pontos de contato force a penetração do verniz com o fio dental.

Aplique uniformemente Fluorniz por quadrante, removendo os excessos não aderidos. Não é necessário a secagem com ar do produto.

Após a aplicação instrua o paciente para não ingerir alimentos sólidos e naquele dia não escovar os dentes.

Após o uso, feche bem o frasco do verniz.

Recomenda-se o tratamento profilático com Fluorniz a cada seis meses. Nos casos de incidência de cárie maior que a normal, o verniz deve ser aplicado com maior frequência.

No tratamento de dessensibilização da dentina, a aplicação deve ser feita por 2 ou 3 vezes a cada 7 dias.

Caso o Fluorniz se apresente mais viscosos do que o normal, dilua-o com o solvente para Fluorniz até sua consistência original.

Advertências

Remova o verniz nos casos de intolerância ao produto.

Caso haja ingestão inadvertida do produto, poderão ocorrer náuseas e vômitos. Induza o vômito fazendo com que o paciente ingira um copo de água morna adicionada de uma colher de chá de sal de cozinha. Faça o paciente ingerir leite ou água de cal.

Precauções

Não utilizar com o prazo de validade vencido

Manter fora do alcance de crianças

Somente para uso odontológico

Este material foi fabricado para uso dental e deve ser manipulado de acordo com as instruções.

Armazenagem

Para preservar as qualidades do produto, recomendamos guardá-lo bem fechado, em local fresco e, se possível, sob refrigeração (em geladeira fora do congelador, temperaturas entre 2 e 8°) e manter longe do calor, faíscas e fogo.

Apresentação

Estojo contendo 1 frasco de vidro com 10 ml de Fluorniz,
1 frasco de plástico contendo 10 ml de Solvente para
Fluorniz e instrução de uso.

Uso exclusivo do cirurgião-dentista

Registro ANVISA n.º: 10041120148

Téc. Responsável: Arnildo Kuwer Neto – CRF RJ –3000

S.S. White Artigos Dentários Ltda.

Rua Senador Alencar, 160 - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: 68.567.650/0001-57 - Indústria Brasileira

<http://www.sswwhite.com.br>

e-mail: tcientif@sswhite.com.br

SAC - Setor de Atendimento ao Cliente – 0800 701 0132